

ОБЛИК

practice book

REVI

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА,
НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ В МИРЕ





REVI

Концентрация ГК: 1%
 Концентрация трегалозы: 0,2%
 Рекомендуемая игла: 32G/33G
 Объем: 1 мл
 Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa

Морфотип старения: усталый.
 Техника введения: микропапульная.

Область введения: периорбитальная.
 Протокол процедуры: 1 процедура раз в 3 месяца. При наличии ярко выраженных изменений 2–3 процедуры 1 раз в месяц.

REVI STYLE

Концентрация ГК: 1%
 Концентрация трегалозы: 0,15%
 Рекомендуемая игла: 30G/32G/33G
 Объем: 1 мл/2 мл
 Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa

Морфотип старения: усталый.
 Техника введения: микропапульная, папульная.

Область введения: на коже лица и шеи — папульно, в периорбитальной области — микропапульно.
 Протокол процедуры: 1 процедура раз в 2–3 месяца. При наличии ярко выраженных изменений 2–3 процедуры 1 раз в месяц.

REVI SILK

Концентрация ГК: 1,2%
 Концентрация трегалозы: 0,25%
 Рекомендуемая игла: 30G/32G/33G
 Объем: 1 мл/2 мл
 Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa

Морфотип старения: мелкоморщинистый.
 Техника введения: линейная, папульная, микропапульная.

Область введения: на коже лица и шеи — папульно, линейно, в периорбитальной области — микропапульно.
 Протокол процедуры: 1 процедура раз в 4 месяца. При наличии ярко выраженных изменений 2–3 процедуры 1 раз в месяц.

REVI STRONG

Концентрация ГК: 1,5%
 Концентрация трегалозы: 0,3%
 Рекомендуемая игла: 30G/32G/33G
 Объем: 1 мл/2 мл
 Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa

Морфотип старения: мускульный.
 Техника введения: линейная, папульная, микропапульная.

Область введения: на коже лица и шеи — папульно, линейно.
 Протокол процедуры: 1 процедура раз в 5–6 месяцев. Интенсивное восстановление — 2–3 процедуры 1 раз в месяц. Не рекомендуется использовать в периорбитальной области.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА С УНИКАЛЬНЫМ СОСТАВОМ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

ДОКАЗАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕШЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРОБЛЕМ



www.clspro.ru • sale@clspro.ru • +7 (495) 012 58 73


[@cls_int](https://www.instagram.com/cls_int) • [@clspro.ru](https://www.facebook.com/clspro.ru)

Revi — новое слово в биоревитализации

Протокол коррекции периорбитальной зоны и овала лица с помощью препаратов Revi для пролонгированной биоревитализации с возможностью проведения инъекций один раз в несколько месяцев.

Введение

Биоревитализация — это основа основ в эстетической медицине, но многие косметологи теряются при выборе препарата, а порой жалуются на отсутствие эффективности.

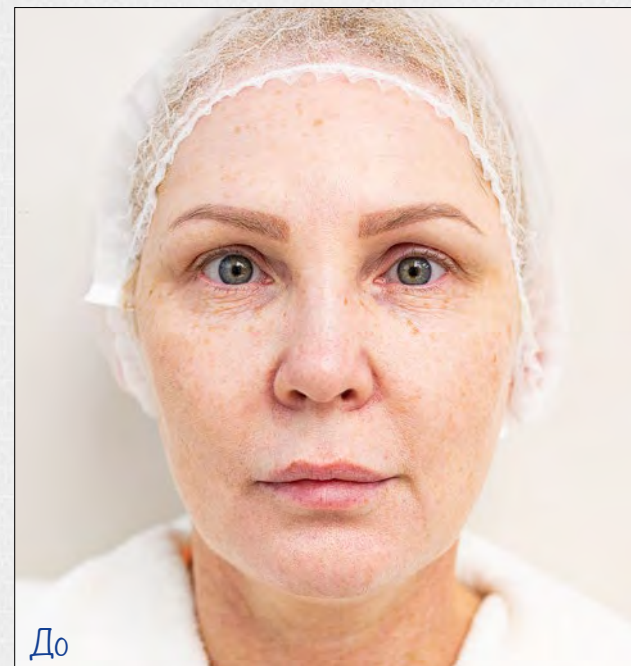

Малика Абдушукурова

врач-дерматолог,
косметолог, Санкт-Петербург.

@doctor.malika

Материалы и методы

Уникальность препарата Revi заключается в его составе — это гиалуроновая кислота и трегалоза. На сегодняшний день трегалозу называют «сахаром, замедляющим старение». Вместе с гиалуроновой кислотой, обволакивая клетку, трегалоза защищает клеточные мембраны от агрессивного воздействия внешней среды. Гиалуроновая кислота является основой межклеточного матрикса, поэтому её присутствие жизненно необходимо для нормального функционирования клеток.




Свойства трегалозы:





- природный криопротектор — защищает клетки от любых перепадов температуры,
- ограждает мембраны клеток от воздействия любых факторов агрессии — экзо- и эндофакторов: хемокинов, провоспалительных цитокинов,
- не образует сшивки с белками, тем самым решается вопрос с гликацией коллагена, который является одним из факторов появления возрастных изменений кожи,
- защищает клетки от стресса, вызванного обезвоживанием,
- обладает теламеразо-стимулирующим эффектом,
- участвует в процессе запуска процесса аутофагии — одного из ключевых механизмов клеточного очищения.

В нашем мастер-классе мы рассмотрим инъекционное введение двух препаратов из линейки — Revi и Revi Strong. Первый предназначен для работы в периорбитальной зоне, содержит 1% высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (3mDa) и 0,2% трегалозы. Второй предназначен для средней и нижней трети лица, шеи и декольте. Revi Strong содержит 1,5% высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и 0,3% трегалозы.

Пациент О., 50 лет. Соматически здорова. Аллергоанмнез отсутствует. На коже отмечаются многочисленные пигментированные (красновато-коричневые), депигментированные (белые) пятна и множественные сосудистые разветвления (телеангиэктазии). Диагноз — пойкилодермия. Морфотип старения лица — смешанный (мелкоморщинистый и деформационный). Отмечается наличие статических морщин в периорбитальной зоне, птоз мягких тканей 1–2 степени (оценка по овалу лица).

Цель процедуры — поработать с качеством кожи в периорбитальной зоне, провести профилактику и коррекцию возрастных проявлений и запустить механизм уплотнения и осветления кожи за счёт «очищения» межклеточного пространства.

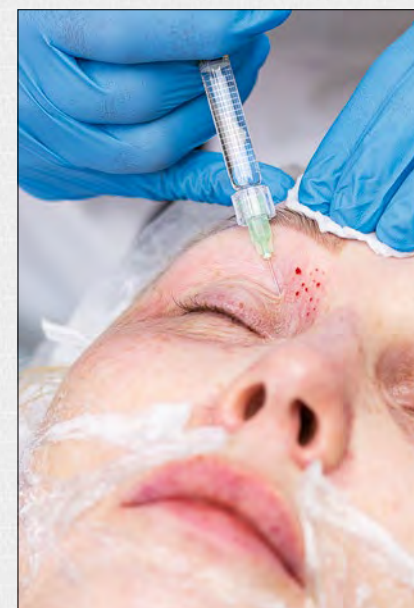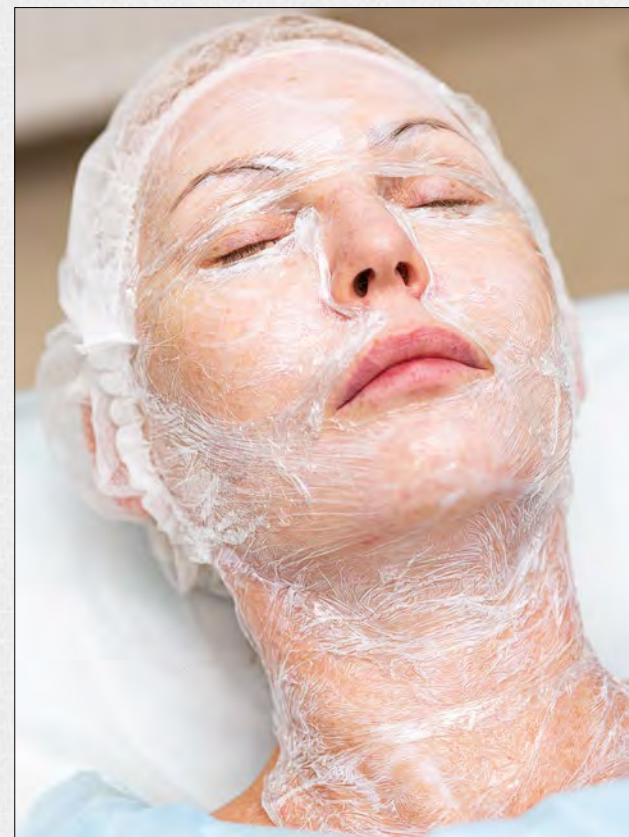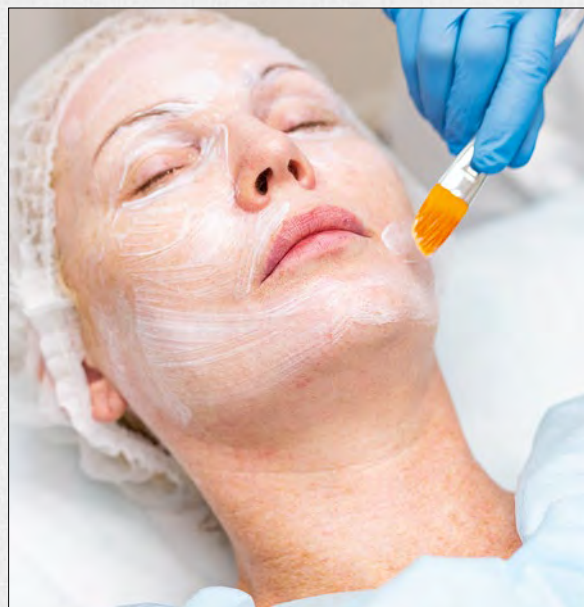

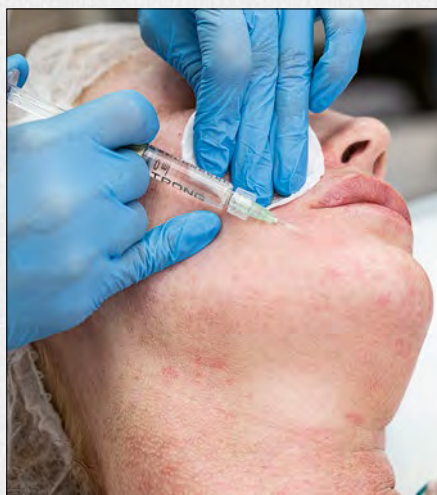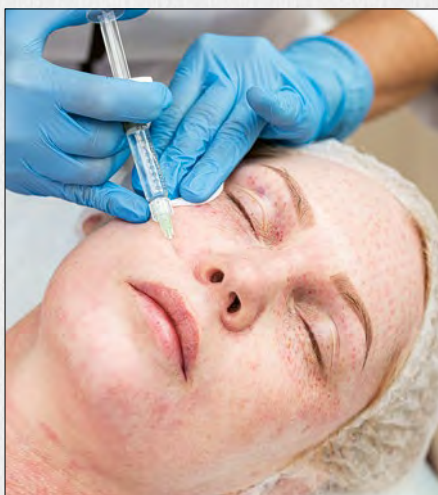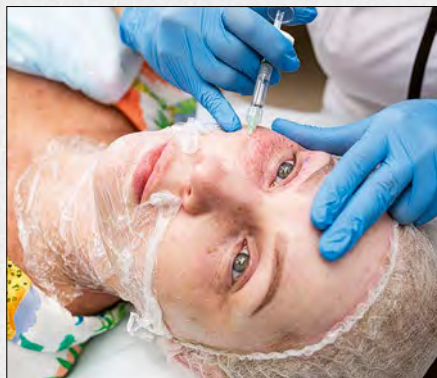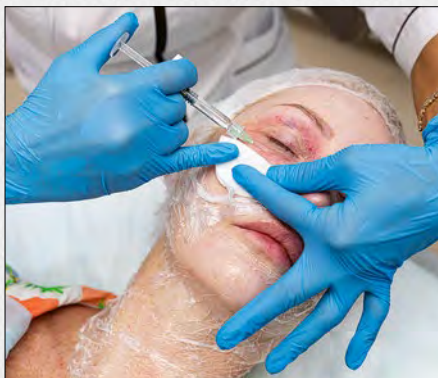

Протокол процедуры

1. Обработка кожи раствором антисептика.
2. Нанесение анестезирующего крема (например, «Акриол-Про») под окклюзионную пленку на 20 минут.
3. Препарат Revi инъектируется строго мелкопапульно по всему периметру орбиты — верхнему и нижнему векам, с обработкой кожи внутреннего угла глаза. Поскольку объем препарата составляет 1 мл, то этого достаточно для инъектирования всей верхней и частично средней третей лица. На инъектирование одной периорбитальной зоны расход препарата составляет примерно 0,2–0,3 мл. Используемые иглы — 32G × 13 мм (2 штуки прилагаются к каждой упаковке с шприцем).
4. Затем мы начинаем использовать препарат Revi Strong. Среднюю треть инъектируем стандартной папульной техникой с шагом примерно в 1 см. Инъекции необходимо проводить по линиям Лангера (линии натяжения кожи, в которых находится максимальное скопление коллагеновых волокон).
5. Нижняя треть лица (овал) также прорабатывается по линиям Лангера, но линейно-ретроградным введением препарата, в технике армирования. Игла вводится на всю длину, и препарат выводится на обратном ходу при выведении иглы. Иглу вводить строго внутридермально.
6. После проработки кисетных морщин, морщин «марионеток» в стандартной папульной технике прорабатывается кожа шеи.
7. После завершения процедуры кожа обрабатывается раствором антисептика и наносится мазь «Траумель С». В летнее время завершить процедуру рекомендуется нанесением крема с SPF.

Revi эффективен в течение 6—8 месяцев. Срок зависит от возраста, состояния кожи, биорепаративного потенциала клеток, образа жизни.



Сразу после

Результат коррекции

Все пациенты, получавшие процедуру с использованием препаратов группы Revi, отмечают «сияние» кожи, выравнивание тона, осветление пигментных пятен, повышение плотности кожи, уменьшение отёчности на лице, а также лифтинг-эффект. Пациентка О. не стала исключением. ○

