

WHITE EVER

White*Ever
FILLER | ONLINE




АССОРТИМЕНТ И ДИЗАЙН

Модельный ряд:

- Коги
- для Ринокоррекции
- для Объема и Подтяжки
- Базовые

Mono / Screw
U-Cog / Double Cog
Volume / Duo Ten
i-Filler
Hiko / New-Misko
Cog / Double Cog
Volume / Duo Ten
Double Cog
Mono / Screw

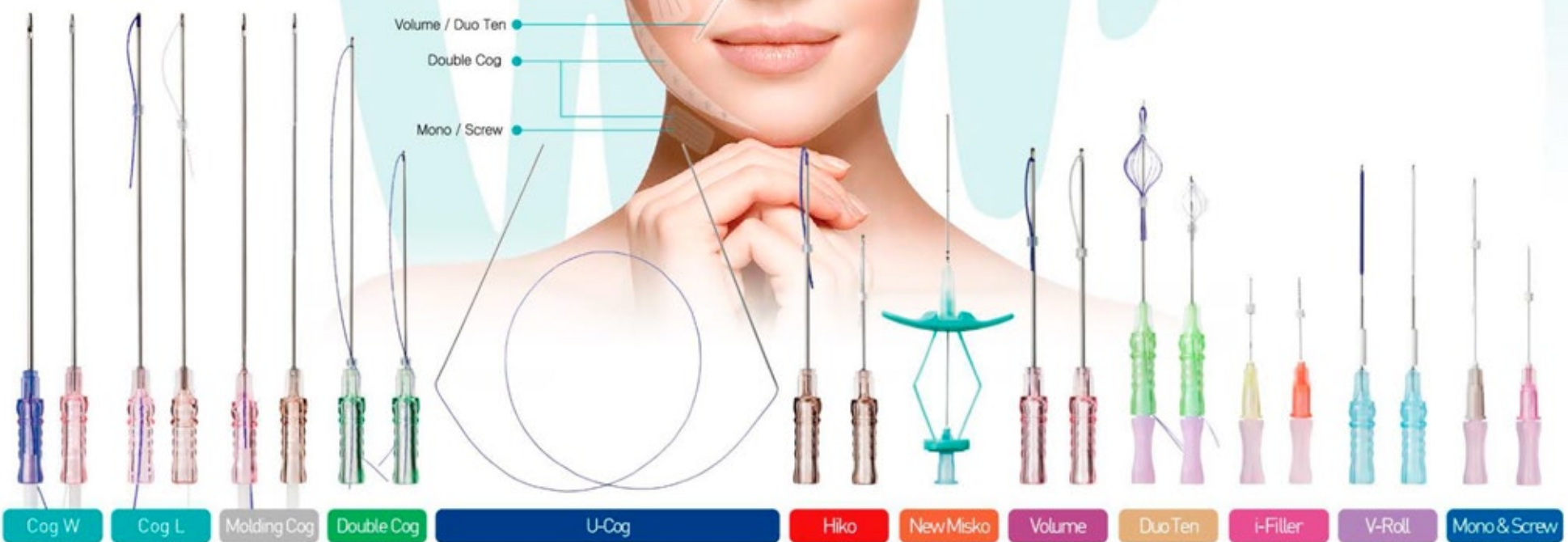ПОЛУЧИТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Cog W Cog L Molding Cog Double Cog U-Cog Hiko NewMisko Volume DuoTen i-Filler V-Roll Mono & Screw


Коги

для
Ринокоррекции

для Объема и Подтяжки

Базовые


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС – ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СБОРКИ

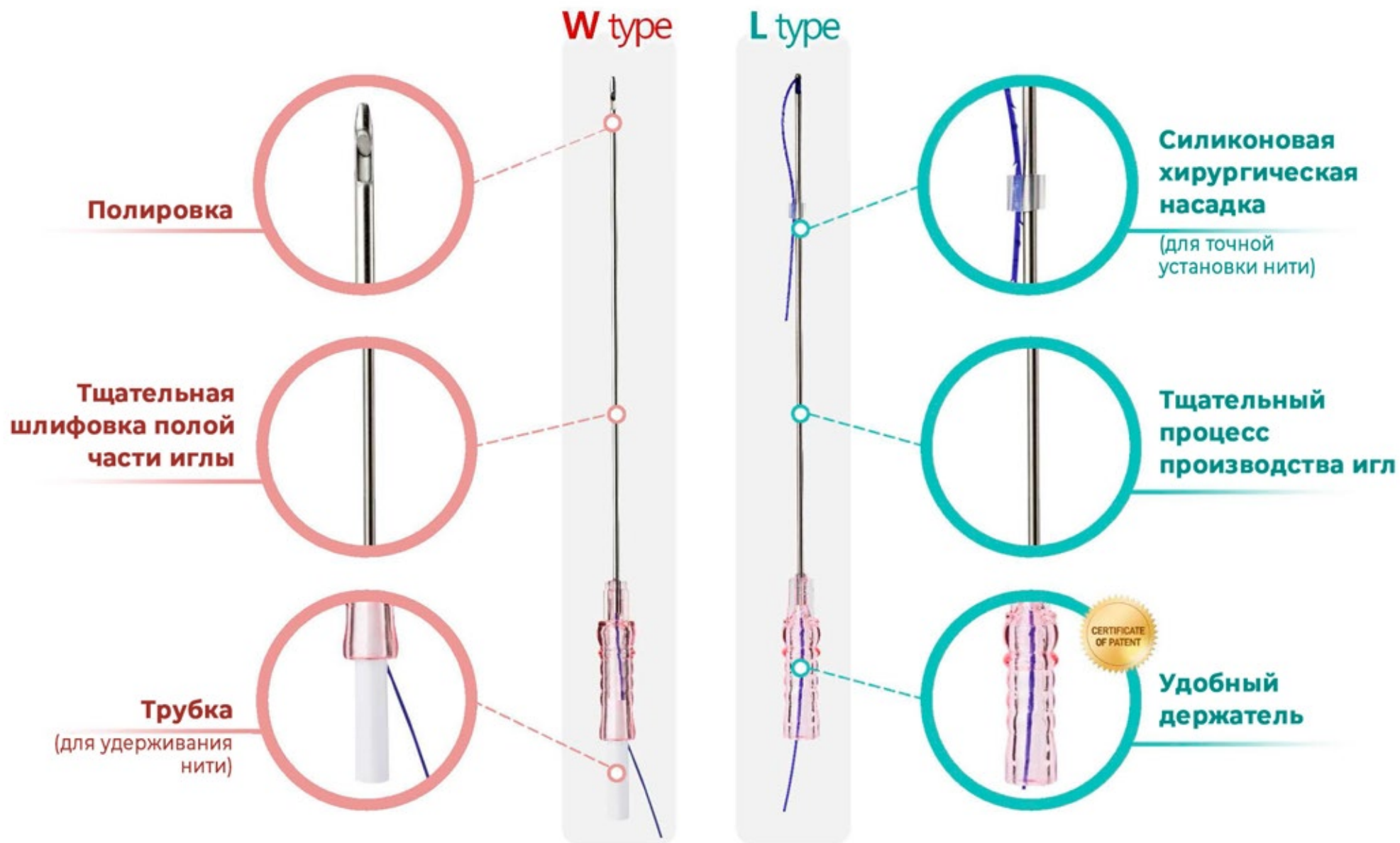

WHITE EVER LIFTING

FILLER | ONLINE

МАТЕРИАЛ - НИТИ PDO / PCL

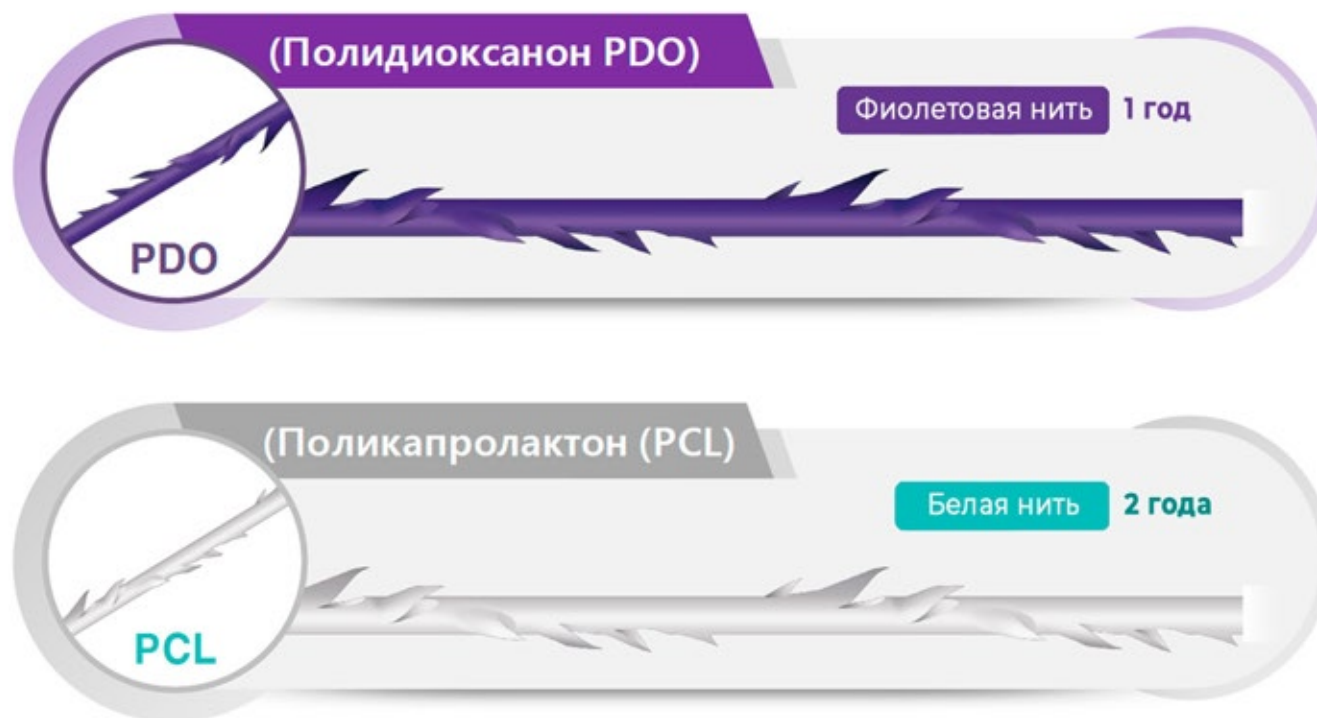

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Температура : ниже 25°C



Влажность : ниже 50%

WHITE EVER LIFTING

FILLER | ONLINE

МОДИФИКАЦИИ КАНЮЛЬ

W-ТИП



L-ТИП




N-ТИП



O-ТИП



S-ТИП

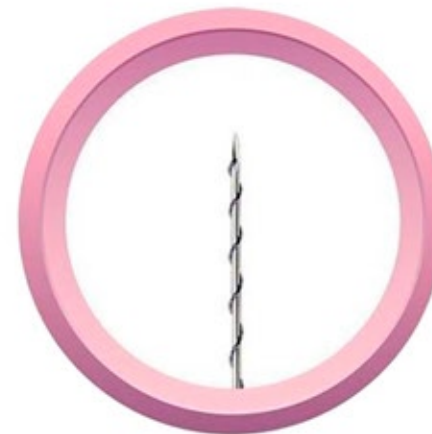

Cog



6D Cog

Лифтинг подтяжка (Коги)

FILLER | ONLINE

PDO

PCL

в блистере 12 шт.
[3 упак.*4 шт.]



- Безопасность в использовании благодаря закрытой канюле W типа;
- Насечки 6D по всей окружности нити (360 °C);
- Правильно расположенные насечки усиливают сцепление и силу натяжения;
- Очень мощная и самая большая по толщине нить – 17G 100mm/160mm USP 3&4;
- Удобный фиксатор для удерживания нити.

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
17G	100 mm	W	160 mm	3&4	o	o
18G	100 mm	W	160 mm	2	o	o
19G	100 mm	W	160 mm	1	o	o



- Легкое и простое использование благодаря полускошенной L типу канюле;
- Насечки 6D по всей окружности нити (360 °C);
- Правильно расположенные насечки усиливают сцепление и силу натяжения
- Самые разные типы игл и нитей 18G ~ 23G.

Gauge	Иглы		Нити		PDO	PCL
	Длина	Тип	Длина	USP		
18G	100 mm	L	200 mm	2	o	o
19G	100 mm	L	200 mm	1	o	o
19G	60 mm	L	140 mm	1	o	o
21G	90 mm	L	180 mm	2-0	o	X
21G	60 mm	L	140 mm	2-0	o	X
23G	90 mm	L	180 mm	3-0	o	X
23G	60 mm	L	140 mm	3-0	o	X

Cog



6D Cog

Лифтинг подтяжка (Коги)

FILLER | ONLINE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вся область лица
Провисший подбородок
Двойной подбородок и подтяжка шеи
Подтяжка тела

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед процедурой, в соответствии с потребностью пациента, рисуем вектора, по которым будем проводить процедуру;
2. Анестезируем;
3. С помощью таранной иглы делаем прокол;
4. Вводим нить;
- 5-1. Удаляем держатель белого цвета;
- 5-2. Слабо подкручиваем нить и фиксируем её;
6. Извлекаем канюлю, придерживая место фиксации нити рукой;
7. Подтягиваем нити 2~3 раза;
8. Обрезаем нити максимльно близко к коже, придерживая точку фиксации.

Только для W-типа

РЕЗУЛЬТАТ

Форма лица V-line
Лифтинг
Уменьшение морщин



До

После





PDO

PCL

в блистере 12 шт.
[3 упак.*4 шт.]



“ 3-е Поколение = WM Molding ”

- Wire-cut Molding: 3-е поколение & сделанные без термовоздействия;
- Безопасность в использовании благодаря закрытой канюле W типа;
- Двухнаправленные коги;
- Насечки, вырезанные внутри нити, по ощущениям самые комфортные для пациента.



Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
18G	100 mm	W	160 mm	3&4	o	o
19G	100 mm	W	160 mm	3&4	o	o



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вся область лица
Провисший подбородок
Двойной подбородок и подтяжка шеи
Подтяжка тела

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед процедурой, в соответствии с потребностью пациента, рисуем вектора, по которым будем проводить процедуру;
2. Анестезируем;
3. С помощью таранной иглы делаем прокол;
4. Вводим нить;
- 5-1. Удаляем держатель белого цвета;
- 5-2. Слабо подкручиваем нить фиксируем её;
6. Извлекаем канюлю, придерживая место фиксации нити рукой;
7. Подтягиваем нити 2~3 раза;
8. Обрезаем нити максисмально близко к коже, придерживая точку фиксации.

Только для W-типа

РЕЗУЛЬТАТ

Форма лица V-line
Лифтинг
Уменьшение морщин



До

После





6D Cog

Длинная нить коги на тонкой канюле

PDO

в блистере 12 шт.
[3 упак.*4 шт.]



Максимальное количество
на 1 процедуру :

12~20 шт / 1 человек

- 1 Носогубная складка
- 2 Челюсть
- 3 Линия скул

- **Длинная коги-нить с канюлей 21G** →
→ Возможность использования в той области лица, где тонкая жировая прослойка (брови, лоб, виски и т.д.);
- Легкое и простое использование благодаря полускошенной L типу канюле;
- 6D насечки по всей окружности нити (360 °C).



Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
21G	60 mm	L	210 mm	2-0	o	X
21G	90 mm	L	285 mm	2-0	o	X



6D Cog

Длинная нить коги на тонкой канюле

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Использование в месте применения других продуктов серии Cog (Коги);
- Использование там, где тонкая кожа (лоб, брови, виски и т. д.);
- Эффективны для подтяжки подбородка и шеи;
- Сокращение ширины ноздрей;
- Возможна комбинация с разными видами модификаций (Cog W и т.д.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед процедурой, в соответствии с потребностью пациента, рисуем вектора, по которым будем проводить процедуру;
2. Анестезия;
3. С помощью таранной иглы делаем прокол;
4. Вводим мезонить;
5. Извлекаем канюлю, придерживая место фиксации нити рукой;
6. Подтягиваем нити 2~3 раза;
7. Обрезаем нити максимльно близко к коже, придерживая точку фиксации.

РЕЗУЛЬТАТ

Хорошо очерченный нос
Лифтинг
Уменьшение морщин

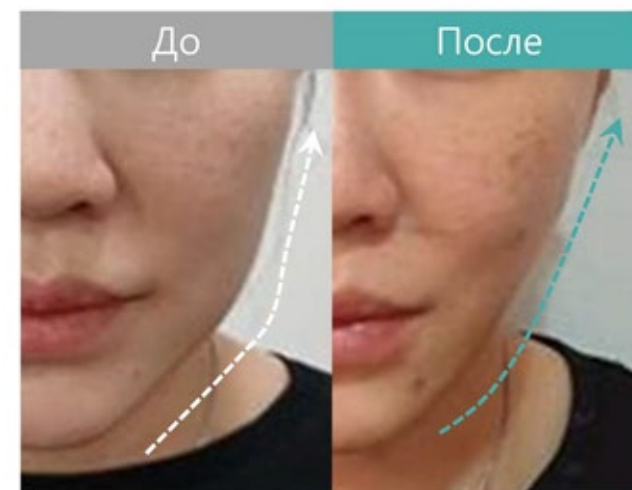



6D Cog

Длинные коги с двумя тупоконечными проводниками



PDO

PCL

в блистере 2 шт.
[2 упак.*1 шт.]



Blunt
Тип

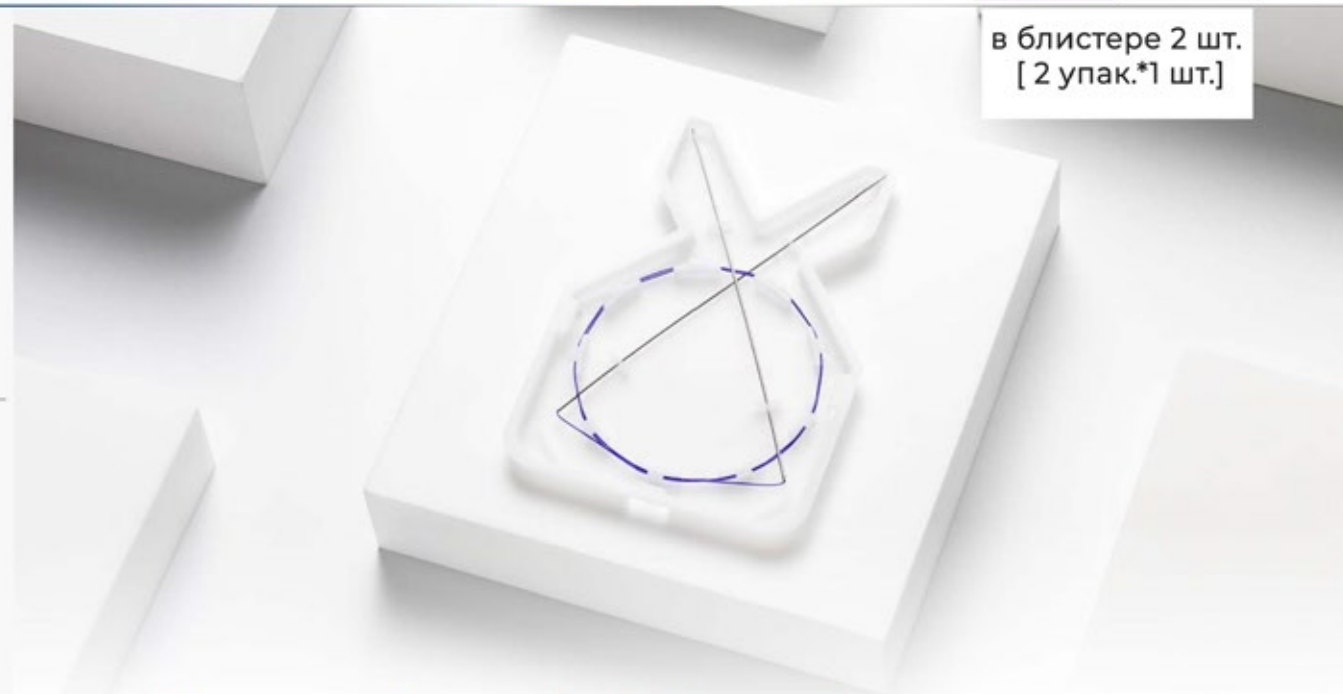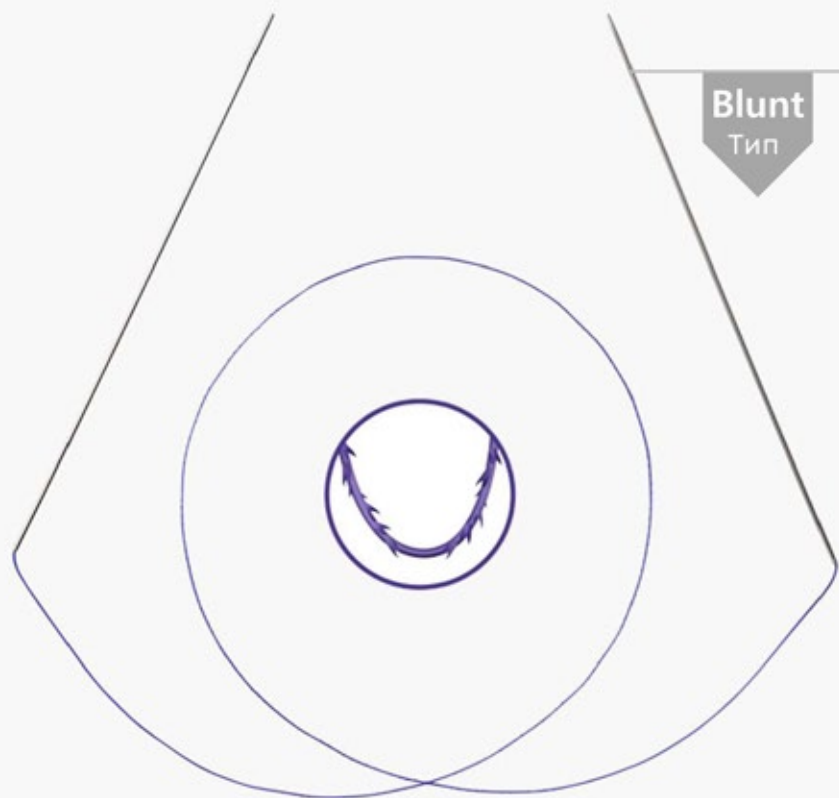

- Подтяжка целой определённой области, работа не по линиям;
- Благодаря тупоконечным канюлям, нить безопасна в использовании;
- Нити для подтяжки лица и тела;
- Оптимизированные насечки на нитях усиливают сцепление.

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
21G	110 mm	Blunt	380 mm	0	0	0
21G	110 mm	Blunt	470 mm	0	0	0



6D Cog

Длинные коги с двумя тупоконечными проводниками

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Лоб
Брови
Щёки
Брылья
Подбородок
Грудь
Ягодицы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Делаем частичную анестезию;
2. Делаем 2~4 прокола в месте входа и выхода канюли;
3. Делаем крюк с помощью нити;
4. Подтягиваем 2-3 раза;
5. Обрезаем оставшиеся нити.

РЕЗУЛЬТАТ

Подтяжка
V-образная форма лица
Объём
Заполнение и разглаживание морщин
Омоложение

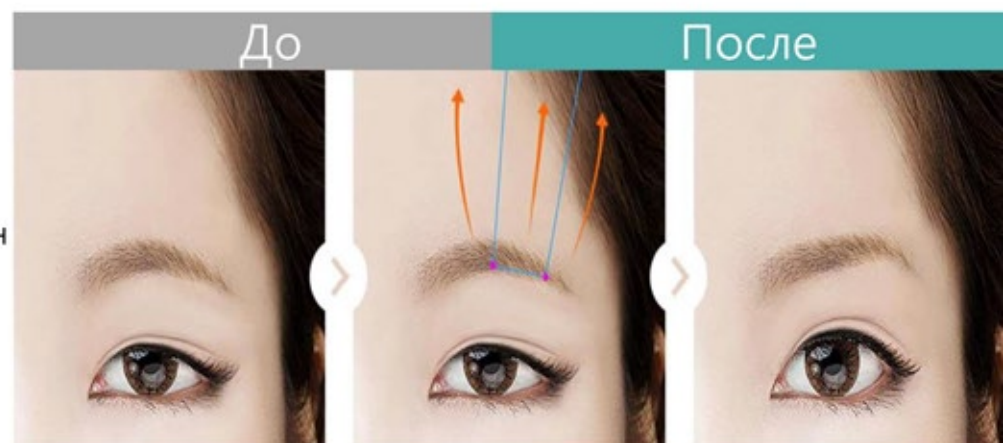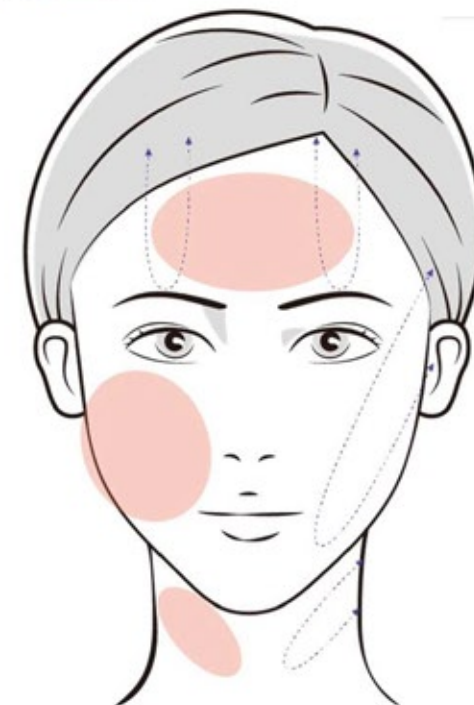



U-Cog



6D Cog

FILLER | ONLINE

Длинные коги с двумя тупоконечными проводниками

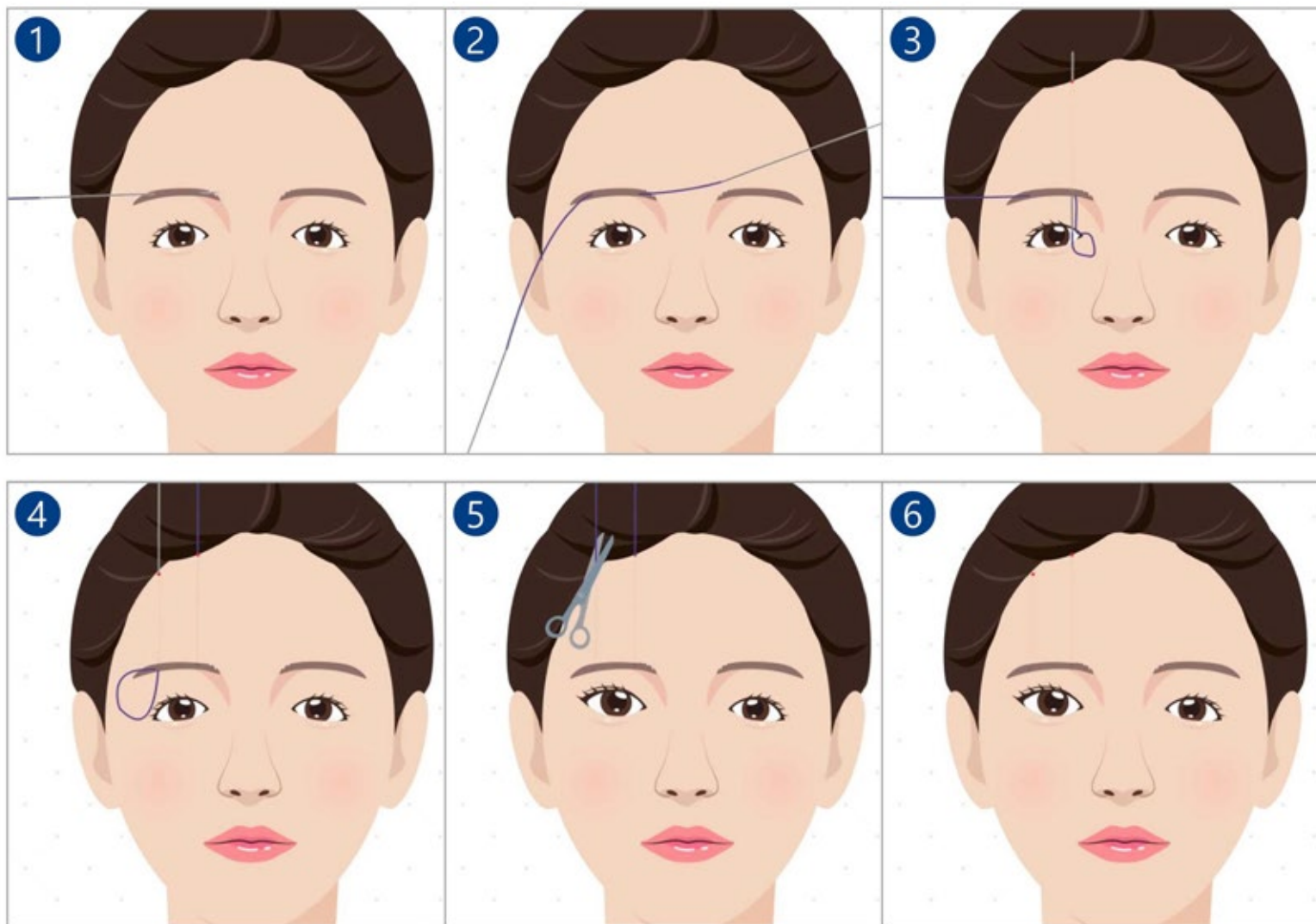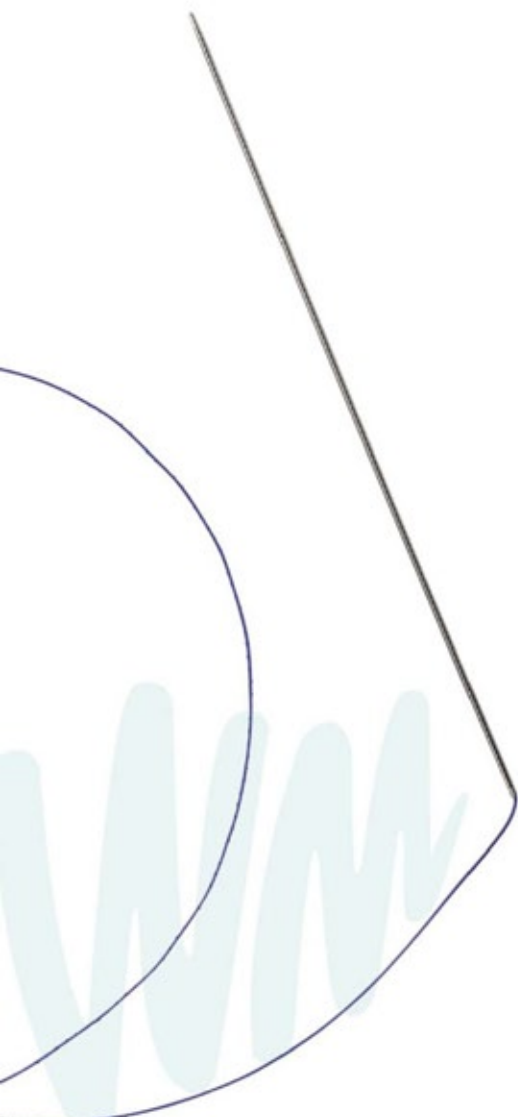



PDO

PCL

в блистере 8 шт.
[2 упак.*4 шт.]



Особый тип прессовки



- **Специальная обработка, которая делает нить прочной;**
- Простая и лёгкая в использовании нить, для проведения процедур для коррекции носа;
- **USP 3&4** : Максимальное увеличение объёма и поддержки;
- Комбинация вместе с филлером;
- Использование в различных целях: увеличение объема, коррекция, поднятие кончика носа и т. д.



- 1 Кончик носа
- 2 Переносица
- 3 Поперечная носовая складка
- 4 Крылья носа

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
19G	38 mm	L	45 mm	3&4	o	o
19G	60 mm	L	80 mm	3&4	o	o

Niko



Нити для ринокоррекции

FILLER | ONLINE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Переносица
Кончик носа
Крылья носа

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Делаем частичную анестезию;
2. На кончике носа делаем один прокол;
3. Вставляем нить в место прокола;
- 3-1. (Переносица) В зависимости от формы носа пациента используем 4~8 нитей;
5. При вставке продукта придерживаем пальцем область носа и продолжаем процедуру;
6. Вставляем нить до самого конца;
7. Извлекаем канюлю и не обрезаем нить.

РЕЗУЛЬТАТ

Хорошо очерченный нос
Прямой нос
Высокий нос

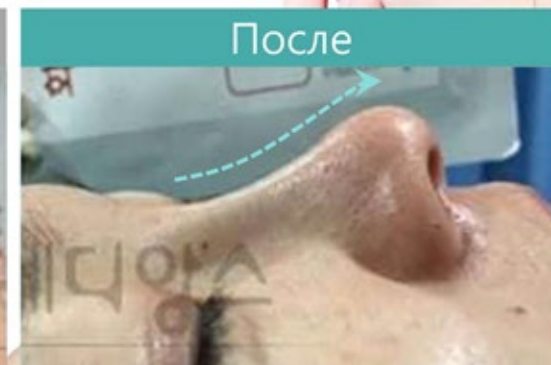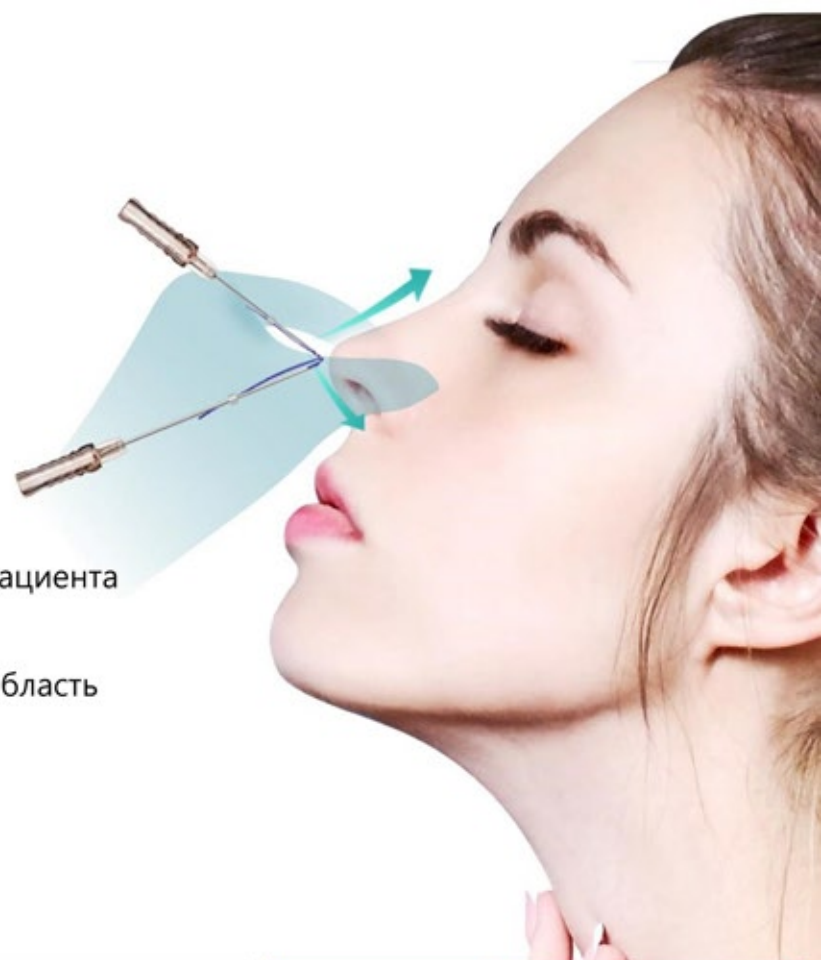

New Misko



Нити для ринокоррекции с инжектором

FILLER | ONLINE

PDO

в блистере 4 шт.
[2 упак.*2 шт.]

CERTIFICATE
OF PATENT



- Только компания WHITE MEDIENCE может изготавливать такие нити с инжектором, имея на это патент;
- Эффективны для коррекции носа;
- Комбинация вместе с филлером;
- **Инжектором:** гигиенический, простой в использовании, экономящий время;
- Использование в различных целях: увеличение объема, коррекция, поднятие кончика носа и т. д.

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
19G	50 mm	О	26 mm	1	О	X
19G	50 mm	О	40 mm	1	О	X





Нити для ринокоррекции с инжектором

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Переносица
Кончик носа
Крылья носа
Колумелла

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Делаем частичную анестезию;
2. Делаем прокол на кончике носа;
3. Вставляем продукцию в место прокола (колумелла/ 2 шт., крылья носа/ по 1 шт.)
4. При вставке продукта придерживаем пальцем область носа и продолжаем процедуру;
5. При введении также необходимо убедиться, что нить идет только по колумелле и не доходит до точки начала губ;
6. При нажатии на инжектор (не более 0.5см.), нить начинает понемногу выходить;
7. После того, как нить зацепилась, слегка нажимая, полностью удаляем инжектор, оставляя сами нити полностью в месте введения.

Результат

Хорошо очерченный нос
Прямой нос
Высокий нос
Поднятие колумеллы

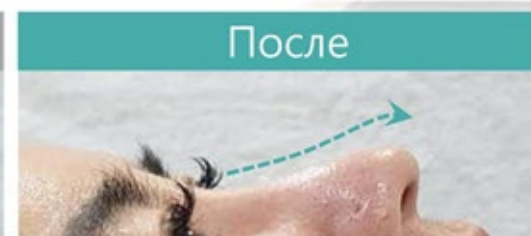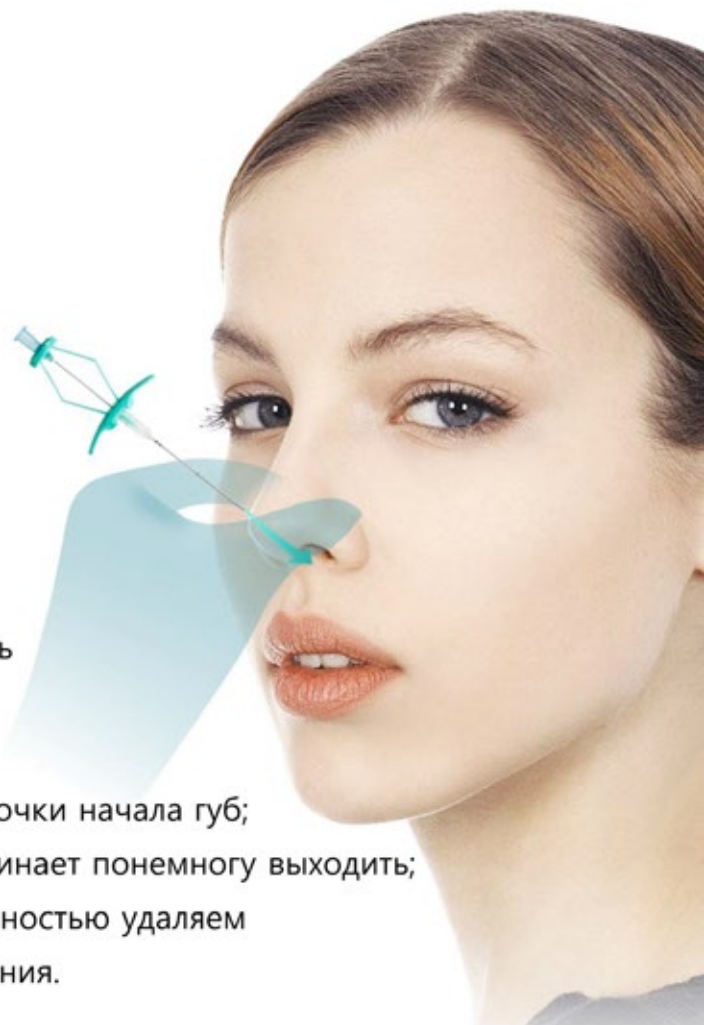

Volume



8 сплетённых между собой нитей : Сетка

PDO

PCL

в блистере 6 шт.
[2 упак.*3 шт.]



- **Объём и подтяжка;**
- **Сетка & Полая форма** → максимальная выработка коллагена;
- Применение с филлером / ботоксом: нить и филлер / ботокс сцепляются → эффективен против морщин + эффект сохраняется дольше;
- Один из лучших продуктов для придания объёма.

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
19G	60 mm	L	60 mm	5-0	o	o
18G	60 mm	L	60 mm	6-0	o	o

Volume





8 сплётённых между собой нитей : Сетка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Носогубные складки
 Марионеточные линии
 Щечно-скуловая борозда
 Скуловая кость
 Висок

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Делаем частичную анестезию;
2. Делаем один прокол для входа;
3. Вводим продукт в место прокола (морщина/1~3 шт.);
4. Вводим до конца мезонить, которая находится с внешней стороны;
5. Извлекаем канюлю.

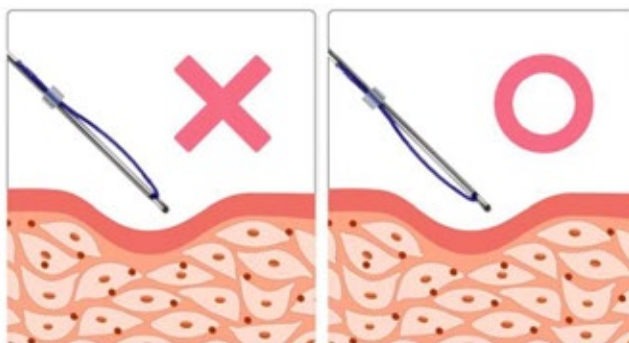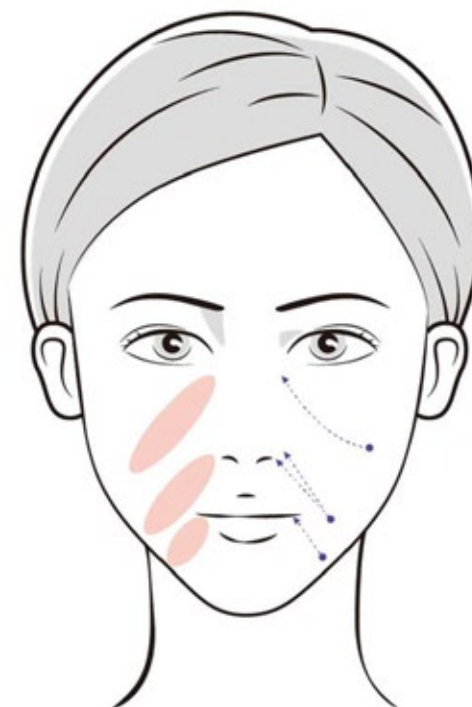

При введении продукта, нить должна быть обращена к коже

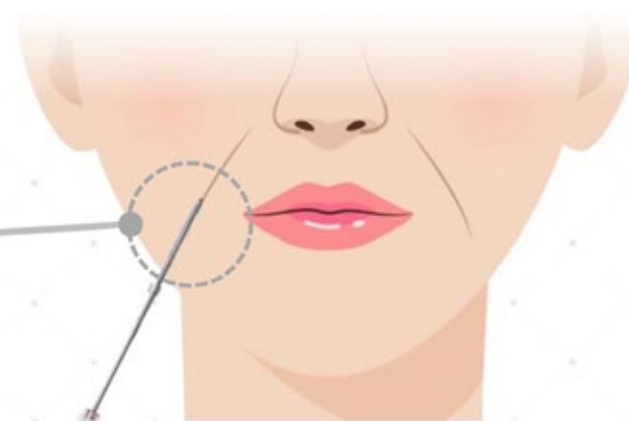

Volume




8 сплетённых между собой нитей : Сетка



РЕЗУЛЬТАТ

Уменьшение морщин
 Выработка коллагена
 Подтяжка кожи
 Короткое время процедуры
 Меньше боли и отёчности

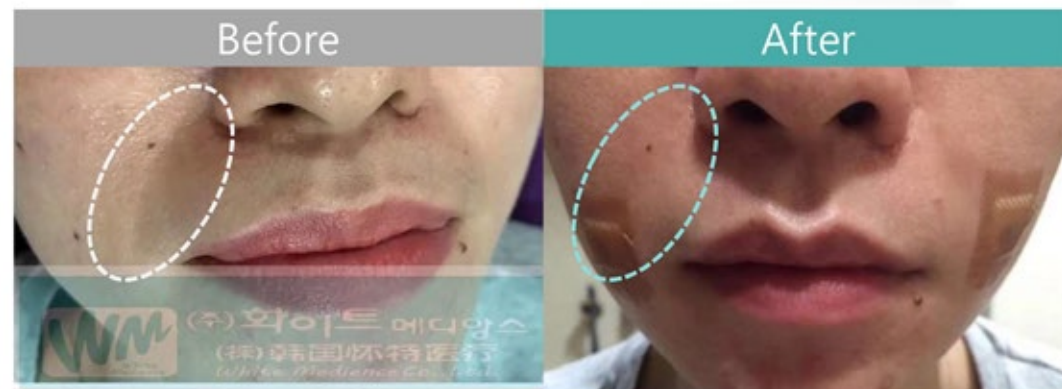



Duo Ten

20 нитей: Объём & Подтяжка

PDO

PCL

в блистере 6 шт.
[2 упак.*3 шт.]



- **Объём & Подтяжка;**
- "Пучок" (18 коротких нитей и 2 длинные в форме "фонтана" → максимальная выработка коллагена;
- Применение с филлером / ботоксом: нить и филлер / ботокс сцепляются → эффективны против морщин;
- Один из лучших продуктов для придания объёма.

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
21G	38 mm	L	50 mm	5-0	o	o
21G	60 mm	L	90 mm	5-0	o	o



Duo Ten




20 нитей: Объём & Подтяжка

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Скуловая кость
Висок
Морщины на лбу
Носогубные складки
Марионеточные линии
Щёчно-скуловая борозда

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

1. Делаем частичную анестезию;
2. Делаем один прокол для входа;
3. Вводим мезонить в место прокола (морщина/1~3 шт.);
4. После ведения мезонити удаляем держатель розового цвета;
5. Извлекаем канюлю;
6. Взявшись за один конец длинной нити, придерживая рукой точку фиксации, извлекаем длинную нить.

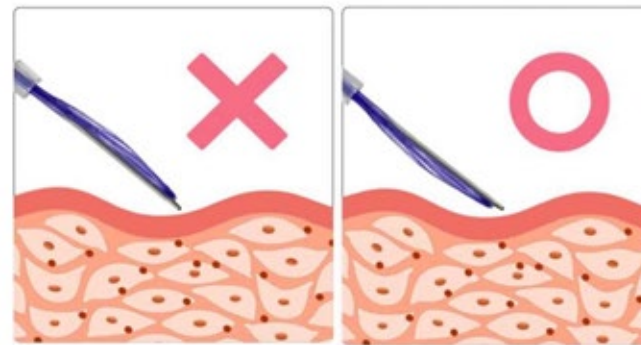


При введении продукта, нить должна быть
обращена к коже





Duo Ten

20 нитей: Объём & Подтяжка

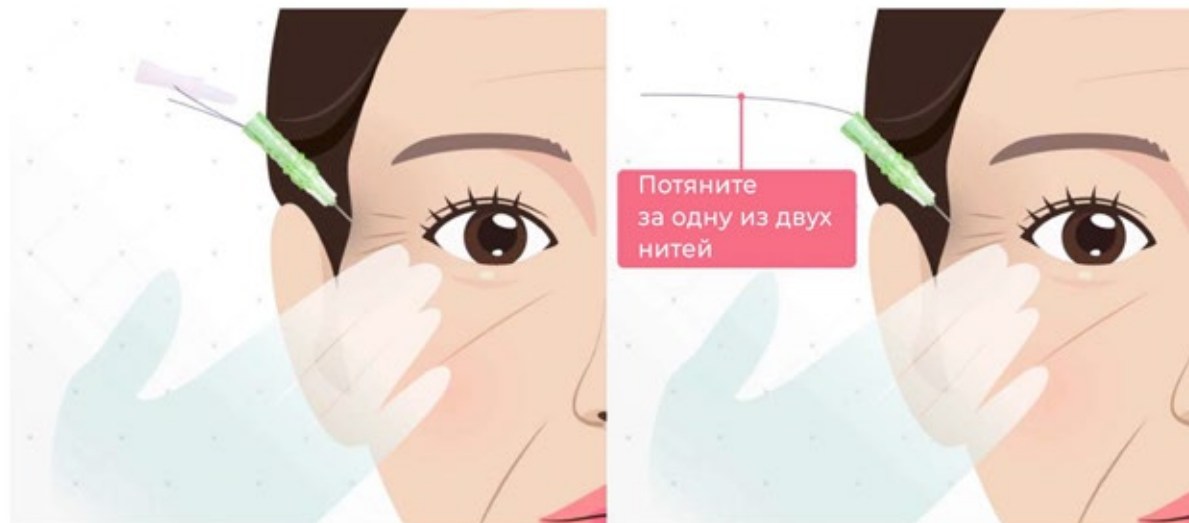

РЕЗУЛЬТАТ

- Уменьшение морщин
- Выработка коллагена
- Подтяжка кожи
- Короткое время процедуры
- Меньше боли и отёчности





PDO

PCL

в блистере 10 шт.
[2 упак.*5 шт.]



- Тонкая & Тупоконечная канюля : 29G, 30G канюля N типа, N-тип канюля предотвращает кровотечение и появление синяков;
- Помогает вырабатывать больше коллагена;
- Лучшая нить для чувствительной зоны и тонкой кожи;
- Устранение морщин путем расслабления мышц.

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
29G	25 mm	N	35 mm	6-0	o	o
30G	25 mm	N	35 mm	7-0	o	o





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Скуловая кость
Висок
Носогубные складки
Марионеточные линии
Морщина на лбу
Щёчно-скуловая борозда

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Делаем частичную анестезию;
2. После прокола вводим нить;
- 2-1. Вставляем нити по направлению морщин;
3. Вводим там, где нужен объём;
4. Подкручиваем слегка нить;
5. Извлекаем канюлю.

РЕЗУЛЬТАТ

Уменьшение морщин вокруг глаз
Отбеливание
Заполнение морщин

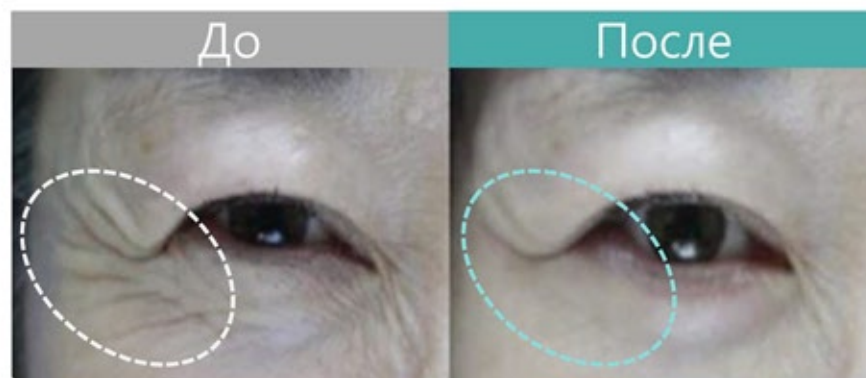

V-Roll




Скрученная нить: Винт

FILLER | ONLINE

PDO

PCL

в блистере 6 шт.
[2 упак.*3 шт.]

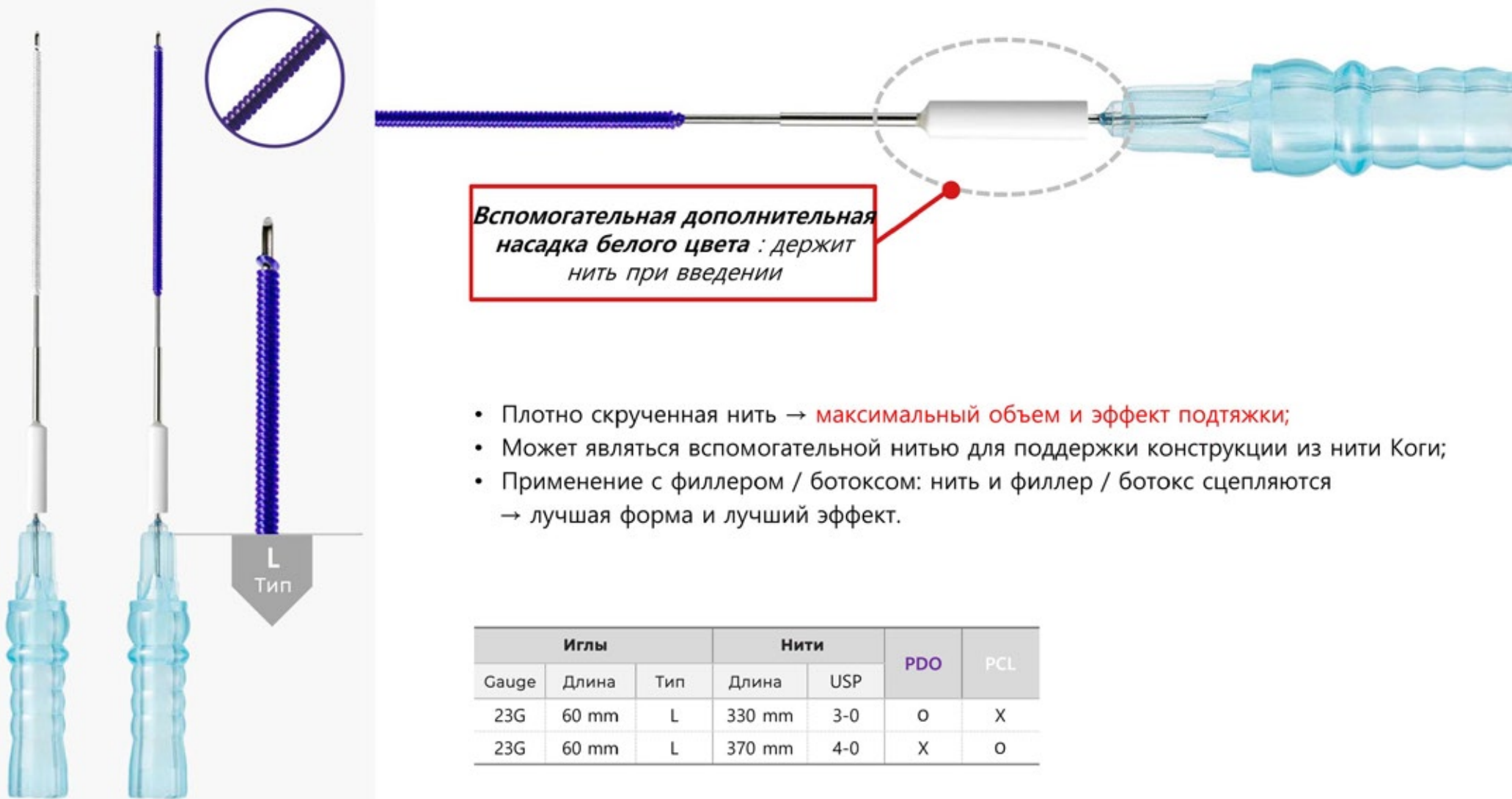

Вспомогательная дополнительная насадка белого цвета : держит нить при введении

- Плотно скрученная нить → **максимальный объем и эффект подтяжки;**
- Может являться вспомогательной нитью для поддержки конструкции из нити Коги;
- Применение с филлером / ботоксом: нить и филлер / ботокс сцепляются → лучшая форма и лучший эффект.

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
23G	60 mm	L	330 mm	3-0	O	X
23G	60 mm	L	370 mm	4-0	X	O



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Носогубные складки
Марионеточные линии
Морщины на лбу
Щечно-скуловая борозда
Щёки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Делаем частичную анестезию;
2. После прокола вводим нить;
3. При введении нити дополнительная насадка с металлическим наконечником должна располагаться непосредственно рядом с нитью;
4. Извлекаем канюлю;
5. Извлекаем дополнительную насадку с металлическим наконечником.

РЕЗУЛЬТАТ


Подтяжка
V-образная форма лица
Объём
Заполнение и разглаживание морщин
Омоложение

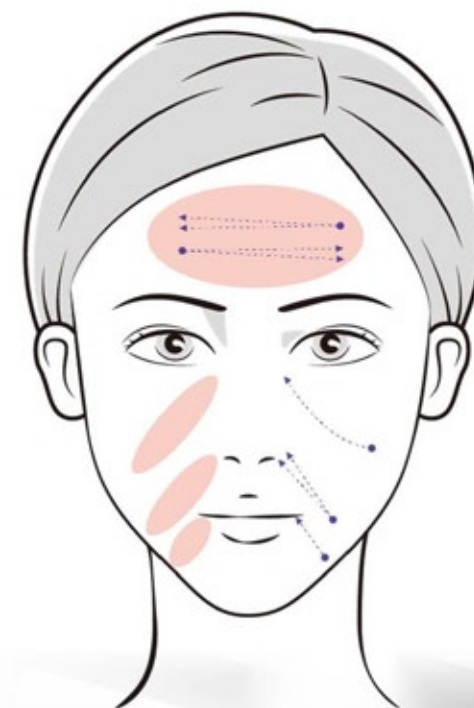

Mono & Screw



Гладкая моно-нить (MONO) и нить-пружина (SCREW)

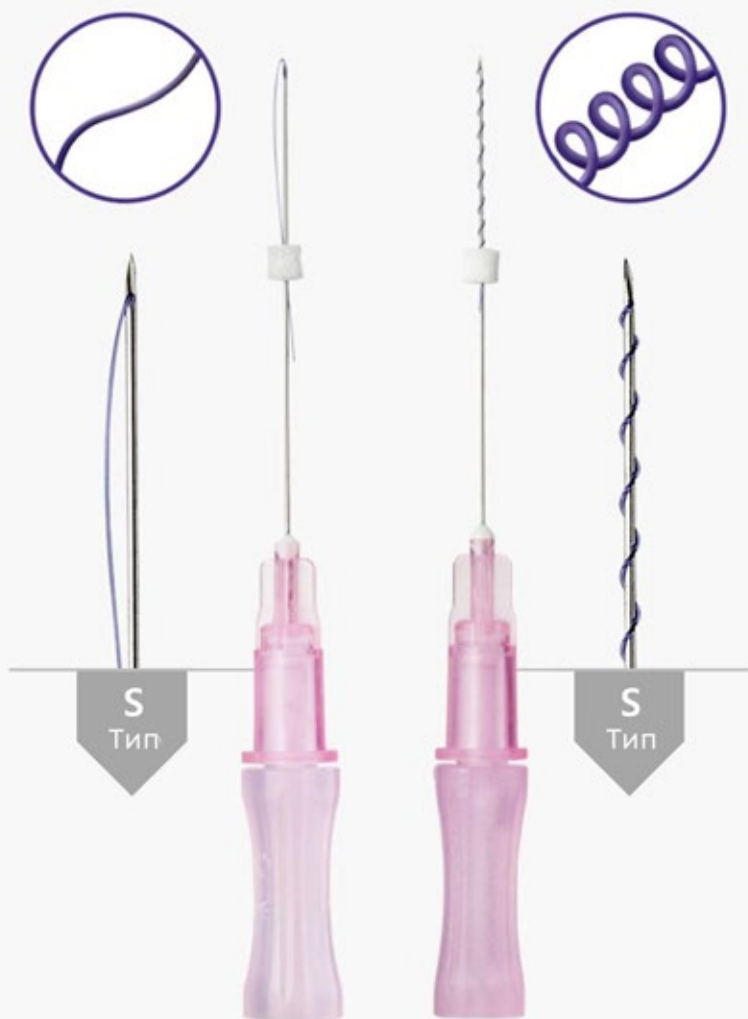


PDO

в блистере 50 шт.
[5 упак.*10 шт.]

PCL

в блистере 20 шт.
[2 упак.*10 шт.]

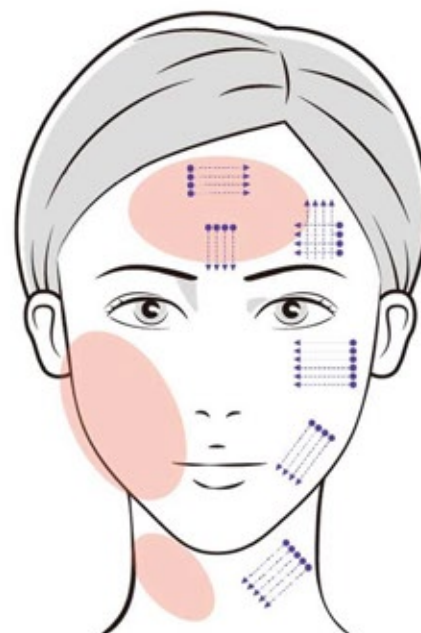

Выработка коллагена

Улучшение эластичности кожи

Эффект заполнения

Сокращение подкожного жирового слоя

- Является закрепляющим фоном после проведения процедур с другими нитями;
- За 40 минут до проведения процедуры нанесите местный анестезирующий крем (Безболезненное проведение процедуры, не влияют на повседневную жизнь (5 дней: НПВП, антибиотики));
- Для проведения процедур на лице требуется в основном 100~150 шт нитей.

Иглы			Нити		PDO	PCL
Gauge	Длина	Тип	Длина	USP		
29G	25 mm	S	35 mm	6-0	o	o
29G	38 mm	S	50 mm	6-0	o	o
27G	60 mm	S	90 mm	7-0	o	X